












Für die Explantation unserer Schrauben wird in der Regel nur ein Schraubendreher benötigt. Dieser hat in den meisten Fällen einen genormten Innensechskant. Die jeweilige Größe entnehmen Sie bitte der Tabelle. Details zu den Schraubendrehern finden Sie am Ende der Liste.

Schlüsselweite   Anschluss		Kreuz-I	Kreuz-II	Sonder	2,5	2,5	3,0	3,5
Durchbohrung in mm		-	0,9	-	1,5	1,8	1,8	2,2
								
<b>Spezielle Fußschrauben</b>								
TWISTER-Schrauben, D 2,0 mm, Kreuzschlitz		✓						
TWISTER-I-Schraube, D 2,0 mm				✓				
TWISTER-I-Schraube D 2,7 mm				✓				
<b>Durchbohrte Schrauben</b>								
INCUS-Schrauben D 2,3 mm, Kreuzschlitz			✓					
Durchbohrte Schraube D 3,0 mm, SK*					✓			
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm, SK*						✓		
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm, SK*								✓
IntraOS-Schrauben S, M, L und XL, SK*							✓	

SK\* - Durchbohrte Schraube mit Sechskantanschluss



Für die Explantation unserer Schrauben wird in der Regel nur ein Schraubendreher benötigt. Dieser hat in den meisten Fällen einen genormten Innensechskant. Die jeweilige Größe entnehmen Sie bitte der Tabelle. Details zu den Schraubendrehern finden Sie am Ende der Liste.

Schlüsselweite   Anschluss		1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Durchbohrung in mm		1,0	1,1	1,8	1,8	2,7
						
<b>Kompressionsschrauben, durchbohrt</b>						
CIRRUS®-Schraube mini D 2,3 mm/D 3,0 mm Kompressionsschraube, SK*		✓				
CIRRUS®-Schraube D 3,0 mm/D 4,0 mm, Kompressionsschraube, SK*			✓			
EPIUS-Schraube D 4,0 mm/D 5,0 mm, Kompressionsschraube, SK*				✓		
METIUS-Schraube D 4,5 mm/D 6,0 mm, Kompressionsschraube, SK*				✓		
CLAVIUS-Kompressions- schraube D 5,5 mm, SK*					✓	
CLAVIUS-Positionsbolzen D 5,5 mm, SK*					✓	
CONTUS-Kompressions- schraube D 7,5 mm, SK*						✓
CONTUS-Positionsbolzen D 7,5 mm, SK*						✓

SK\* - Durchbohrte Schraube mit Sechskantanschluss



SW   AS	Bestellnummer	Bezeichnung
Kreuz-I	750.102038	 Kreuzschlitzschraubendreher, für TWISTER-Schrauben D 2,0 mm, mit Griff und Haltehülse
Kreuz-II	750.102062	 Kreuzschlitzschraubendreher, für INCUS-Schrauben D 2,3 mm, durchbohrt, selbsthaltend, mit Drehgriff
Sonder	750.102008	 Schraubendreher, durchbohrt, für TWISTER-I-Schrauben, mit Griff
SK 1,5 ID 1,0	750.102063	 Sechskantschraubendreher, für CIRRUS®-Schrauben mini D 2,3 mm, durchbohrt, selbsthaltend, Griff
SK 2,0 ID 1,1	750.102027	 Sechskantschraubendreher, durchbohrt, für CIRRUS®-Schrauben D 3,0 mm/D 4,0 mm, mit Griff
SK 2,5 ID 1,5	750.102014	 Sechskantschraubendreher, durchbohrt, für Drähte D 1,4 mm, für Schrauben D 3,0 mm, mit Griff
SK 2,5 ID 1,8	750.102015	 Sechskantschraubendreher, durchbohrt, für Drähte D 1,6 mm, für Schrauben D 4,0/4,5 mm, mit Griff

SW = Schlüsselweite | AS = Anschluss | SK = Sechskant



SW   AS	Bestellnummer	Bezeichnung
SK 3,0 ID 1,8	750.102056	 Sechskantschraubendreher, durchbohrt, für CLAVIUS-Schrauben D 5,5 mm, für Drähte D 1,6 mm, mit Griff
SK 3,5 ID 2,3	750.102016	 Sechskantschraubendreher, durchbohrt, für Durchbohrte Schrauben D 7,0 mm, für Drähte D 2,0 mm, mit Griff
SK 4,0 ID 2,7	750.102055	 Sechskantschraubendreher, durchbohrt, für CONTUS-Schrauben D 7,5 mm, für Drähte D 2,5 mm, mit Griff

SW = Schlüsselweite | AS = Anschluss | SK = Sechskant

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter oder an unseren Innendienst:

Deutschland INTERCUS Vertriebs GmbH | In der Flecke 22-23  
07422 Bad Blankenburg

Ansprechpartner:  
Frau Friedrichs und Frau Unger

Telefon: 036741 586265  
Fax: 036741 586469  
E-Mail: [info@intercus-vertrieb.de](mailto:info@intercus-vertrieb.de)

Export INTERCUS GmbH | Zu den Pfarreichen 5  
07422 Bad Blankenburg

Telefon: +49 36741 588-0  
Fax: +49 36741 588-285  
E-Mail: [info@intercus.de](mailto:info@intercus.de)



National: INTERCUS Vertriebs GmbH | In der Flecke 22-23 | 07422 Bad Blankenburg  
Tel.: +49 36741 586265 | Fax: 586469 | E-Mail: [info@intercus-vertrieb.de](mailto:info@intercus-vertrieb.de)

International: INTERCUS GmbH | Zu den Pfarreichen 5 | 07422 Bad Blankenburg  
Tel.: +49 36741 588-0 | Fax: 588-285 | E-Mail: [info@intercus.de](mailto:info@intercus.de) | GERMANY